

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Аппликатор игольчатый магнитный
из феррита бария АИМБФ-01
ТУ 9398-032-21664678-2017

Назначение

Аппликатор предназначен для лечения и профилактики заболеваний человека постоянным магнитным полем в клиниках, лечебно-профилактических учреждениях и для индивидуального использования в домашних условиях, как в качестве самостоятельного средства магнитной терапии, так и в сочетании с другими физиотерапевтическими или медикаментозными средствами.

Аппликатор является изделием многоразового применения при кратковременном контакте с неповрежденным кожным покровом человека.

Показания к применению

Применяется при лечении болевого синдрома и отеков, возникших в результате воспалений или травм; для профилактики и лечения радикулита, остеохондроза любой локализации, артроза, бронхита, бронхиальной астмы, тонзиллита, ринита, ларингита. Используется для повышения адаптации организма при акклиматизации.

Противопоказания к использованию

- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии;
- заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови;
- психические заболевания в стадии обострения;
- беременность (любые сроки);
- индивидуальная магнитная непереносимость;
- наличие имплантированного кардиостимулятора;
- злокачественные и доброкачественные новообразования в области воздействия;
- открытые раны.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

- легкое головокружение;
- индивидуальную непереносимость человеком воздействия магнитных полей

Порядок работы изделия

Вскрыть упаковку.

Аппликатор накладывается на место патологического процесса и плотно прижимаются руками или эластичным бинтом. Воздействие на шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника происходит за счет механического давления веса больного на аппликатор. Процедуры проводят ежедневно в течение 2-12 дней, в случае хронического заболевания – до 15 дней. Длительность воздействия от 15-40 минут до 1-3 часов. Аппликатор может применяться от 1 до 4 раз в сутки.

Продолжительность использования аппликатора зависит от тяжести заболевания, индивидуальной переносимости организма и определяется самостоятельно по самочувствию пациента. Изделие используется многократно.

Технические характеристики

Габаритные размеры 450*250мм.

Состав: полистирол 100%, тканевая основа хлопок 100%. Пластиковые модули содержат 56 сферических постоянных магнитов, магнитная индукция составляет 35 ± 10 мТл.

Комплектация: аппликатор – 1 шт, подробная инструкция – 1 шт.

Уход за изделием

Можно притирать изделие нейтральным раствором моющих средств или раствором мыла при температуре не выше +40°C. Сушить при комнатной температуре.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи, в пределах срока годности.